


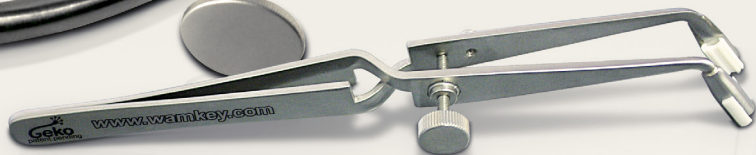

WAM



 **Medicom**

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



WAMKEY

... by bezpiecznie zdjąć!


Wyliminuj ryzyko

Dotychczasowe metody zdejmowania prac protetycznych powodowały ryzyko uszkodzenia aparatu zawieszeniowego zęba i/lub zniszczenie uzupełnienia. Tak więc niezależnie od okresu użytkowania nie można jej było повторно wykorzystać.


WAMkey działa atraumatycznie

Wamkey to zestaw dźwigni opracowanych do szybkiego i atraumatycznego zdejmowania koron i mostów. Absolutnie bezpieczne i nieinwazyjne zdjęcie pracy protetycznej umożliwia ponowne jej wykorzystywanie zarówno jako uzupełnienie tymczasowe jak i stałe.


WAMkey oddziela uzupełnienie w kierunku zgodnym z osią długą zęba. Siły działające na oszlifowany ząb, więzadła i koronę protetyczną zostają zredukowane do minimum, filar pozostaje nienaruszony. Najbardziej istotne części pracy protetycznej: część przyszyjkowa, powierzchnia żująca oraz punkty styczne, zostają zachowane. Dla pacjenta cała procedura jest całkowicie bezbolesna i szybka ponieważ trwa 1-3 minut/punkt.

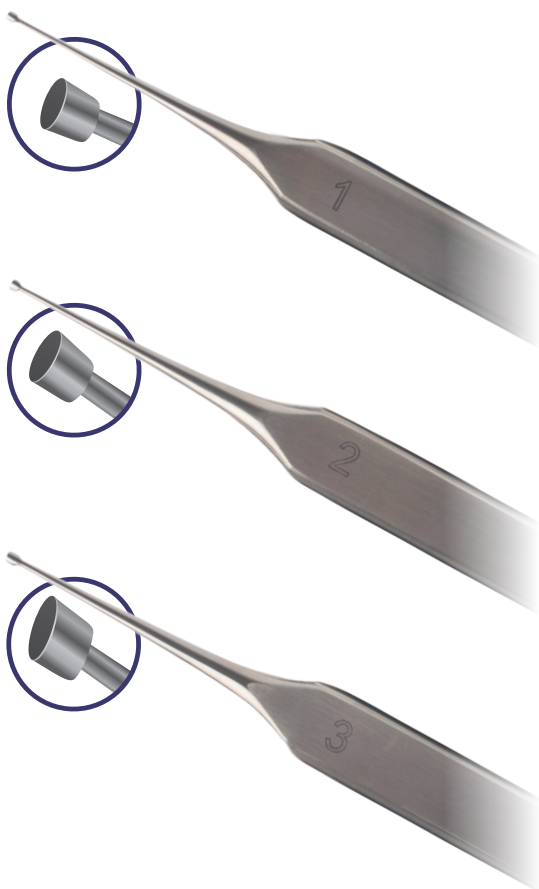


...zrobmy tak!

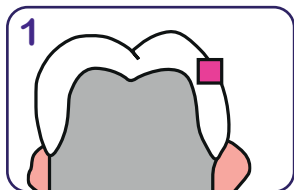


Wybierz najbardziej dogodny punkt wejścia w koronę. Celem jest dotarcie do środka filaru tuż pod wewnętrzną stroną korony protetycznej oraz określenie warstwy cementu.

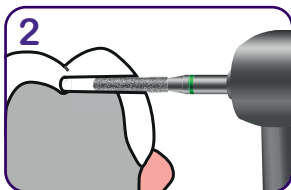


Nawierć wąski poziomy otwór kierując się po zębienie do środka powierzchni żującej lub siecznej.

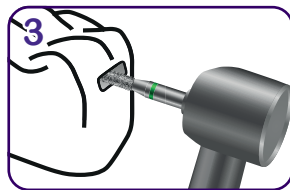

Poszerz otwór w płaszczyźnie poziomej aż do uzyskania prostokątnej tulei wejściowej.

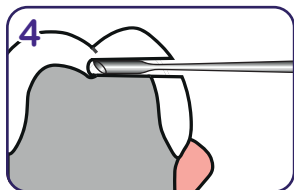

Wprowadź dźwignię nr1 w szczelinę. Jeśli odległość pomiędzy filarem a koroną jest większa, należy dopasować otwór i szczelinę do dźwigni nr2. Jeśli odległość nadal jest za duża, dopasowujemy do dźwigni nr.3.

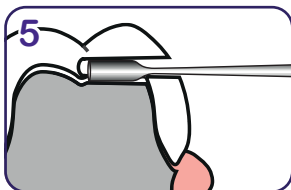

Wprowadzić wybraną dźwignię do środka korony i ostrożnie wykonując kilka półobrotów, doprowadzić do odcementowania pracy.

WAMKEY
Intro-Kit

Zawartość: Zestaw 3 dźwigni (WK1-3),
Nr artykułu: WKP | Cena: 1.628 PLN

MD GUIDE

... by dobrze umiejscowić!



MD Guide to genialny w swej prostocie system lokalizacji implantu na wyrostku, uwzględniający szerokość oraz oś przyszłego uzupełnienia protetycznego.

MD Guide składa się z tulei pilotujących oraz tulei stabilizujących służących do zaplanowania takiej lokalizacji implantu, by nie napotkać na żadne problemy podczas wykonywania prac protetycznych. Tuleje MD Guide działają jak wirtualny ząb, stosuje się je jako prowadnice do wykonywania kolejnych otworów wiertłem pilotującym tak, by lokalizacja implantu była zaplanowana, równoległa i precyzyjna.


Tuleje MD Guide zarówno w systemie pilotującym jak i stabilizującym są zwymiarowane pod uzupełnienia protetyczne. MD Guide zastępuje szablon implantologiczny. MD Guide jest kompatybilny ze wszystkimi systemami implantologicznymi.




...zrobmy tak!



Wybrać wiertło pilotujące połączone z tuleją MD Guide, której szerokość odpowiada brakującemu zębowi, następnie wykonać wiercenie pilotowe na żądaną głębokość (punktem odniesienia jest cylinder). Jako prowadnicę wykorzystać sąsiedni ząb.

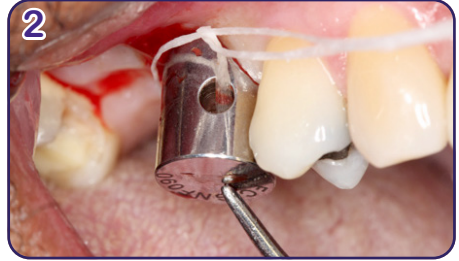

Usunąć tuleję pilotującą (z wiertłem) MD Guide i zastąpić ją tuleją stabilizującą MD Guide („wirtualnym zębem”) tej samej szerokości.

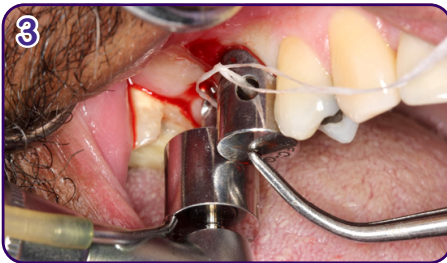

Wybrać kolejną tuleję pilotującą MD Guide o szerokości odpowiadającej następnemu brakującemu zębowi. Wcześniej zamocowana tuleja stabilizująca MD Guide posłuży jako prowadnica i punkt odniesienia podczas ustalania kolejnej lokalizacji implantu. Pracować do osiągnięcia żądanej głębokości (punktem odniesienia jest cylinder).



Oba otwory pilotujące są dokładnie wykonane i idealnie odpowiadają pozycji brakujących zębów. W celu potywierdzenia równoległości można wykonać zdjęcie rentgenowskie.

MD GUIDE Intro-Kit

Zawartość: 5 tulei pilotujących (z wiertłami) MD Guide (różnej średnicy)
5 tulei stabilizujących MD Guide (różnej średnicy)
1 box do przechowywania i sterylizacji

Nr artykułu: FCP | Cena: 3.302 PLN



WAM'X

... by szybko wyjąć!

Zapomnijcie o długotrwałych i skomplikowanych zabiegach!


Dzięki WAM'X wkłady koronowo-korzeniowe usuwa się banalnie łatwo i całkowicie bezpiecznie. WAM'X wykorzystuje zasadę dźwigni i działając w kierunku osi zęba skutecznie oddziela zacementowaną część wkładu od korzenia. Ryzyko złamania i uszkodzenia korzenia podczas usuwania wkładów tą metodą zostało znacząco zminimalizowane.

WAM'X działa atraumatycznie

Końcówki dźwigni zapewniają niezakłóconą ruchomość nadbudowy i jej oddzielenie od kanału korzenia w kierunku najmniejszego oporu. Nacisk na korzeń i otaczającą go tkankę jest niewielki a procedura całkowicie bezbolesna i atraumatyczna dla aparatu zawieszeniowego zęba. Dzięki zastosowaniu trzech rozmiarów końcówek dźwigni, możliwy jest dostęp do każdego wkładu k-k, nawet w skrajnych zębach trzonowych.




...zrobmy tak!

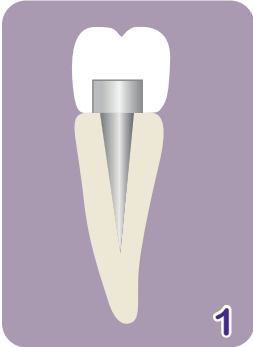


Wyfrezuj przestrzeń pomiędzy częścią nośną korzenia a częścią koronową uzupełnienia tak, by można było w nią wsunąć złożone ramiona dźwigni.



Wybierz odpowiedni na szerokość rozmiar ramion dźwigni.

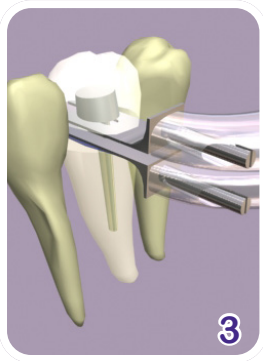

W wyfrezowaną wcześniej szczelinę wsuń ramiona dźwigni.

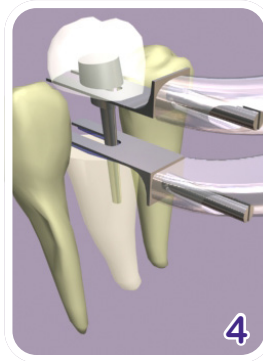

Powolnym ruchem zaciskaj dźwignię. Wkład wysunie się.

WAM'X
Intro-Kit

Zawartość: 1 dźwignia WAM'X,
3 rozmiary ramion i podkładek silikonowych

Nr artykułu: WXP | Cena: 3.584 PLN

TWEEZERS®

... by dobrze trzymać!

CLASSIC TWEEZERS®

Dzięki tej skrzyżowanej pęsecie zaciśkowej można wszystko bezpiecznie podnieść. Pozostaje w biernej pozycji zamkniętej tak długo, jak jest to niezbędne i otwiera się dopiero po lekkim naciśnięciu na rączki. Podanie potrzebnego przedmiotu przez asystę jest łatwe i bezpieczne. Dzięki rowkowanej powierzchni uchwytu pęseta Classic Tweezers® jest uniwersalnym instrumentem chwytającym. Zastępuje konwencjonalną pęsetę i ułatwia trzymanie wielu różnych przedmiotów: kuleczek waty, klinów, nici retrakcyjnych, ćwieków itd.



**CLASSIC
TWEEZERS®**

Zawartość: 1 pęseta Classic Tweezers®
Nr artykułu: CT | **Cena:** 121 PLN

ENDO TWEEZERS®

Rowki podłużne pęsety Endo Tweezers® ułatwiają pracę ze wszystkimi cylindrycznymi i podłużnymi przedmiotami. Szczególnie przydatne do przenoszenia i trzymania gutaperki, papierków osuszających, ćwieków, klinów itp.



ENDO
TWEEZERS®

Zawartość: 1 pęseta Tweezers®
Nr artykułu: ET | **Cena:** 138 PLN

GEKO TWEEZERS®

Dzięki Geko Tweezers® chwytanie i wstawianie koron, wkładów i nakładów staje się dziecinnie prostą zabawą. Blokujące pincety zaciskowe z miękkimi i żłobkowanymi nakładkami silikonowymi, nadającymi się do autoklawowania i znajdującymi się w zestawie pastami przenoszącymi Geko dbają o to, by uzupełnienia protetyczne trafiły precyzyjnie na swoje miejsce. Pasywny mechanizm zamykający zapobiega samowolnemu otwarciu się pincety. Ułatwia współpracę z asystą przy podawaniu uzupełnienia i oszczędza cenny czas. Geko Tweezers są cenną alternatywą dla konwencjonalnych pincet zwłaszcza w obszarze zębów tylnych lub u pacjentów z małym rozwarciem.



GEKO TWEEZERS®

Intro-Kit

Zawartość: 1 pęseta,
1 strzykawka pasty przenoszącej Geko,
20 końcówek silikonowych (do sterylizacji 135°C)

Nr artykułu: GEKT1 | Cena: 948 PLN


omnis

... do wielu misji!

Wielofunkcyjny i solidny instrument do usuwania zbędnych resztek cementu oraz do usuwania nawisów kompozytowych. Instrumenty Omnis 1 lub 2 są niezastąpione w wielu czynnościach i umożliwiają zastąpienie nimi innych wysokiej jakości i delikatnych instrumentów. Jeden służy do zdejmowania nadmiarów cementu lub kompozytu, drugiego można używać jako haków lub dźwigni do zdejmowania prowizoriów.

Instrumenty Omnis mają zastosowanie do:


- usuwania nadmiarów tymczasowego lub ostatecznego cementu
- korygowania nawisów kompozytowych
- modelowania kompozytu
- usuwania koron tymczasowych

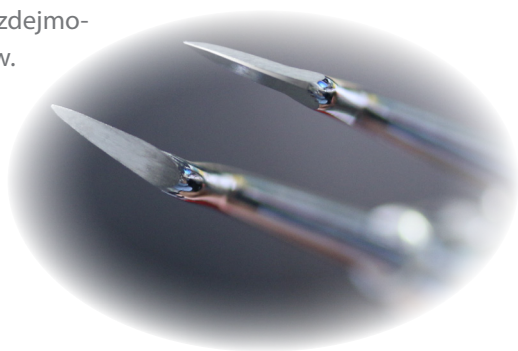

omnis 1

Instrument z ostrzem do usuwania i przycinania nadmiarów


Nr artykułu: OM1 | Cena: 145 PLN

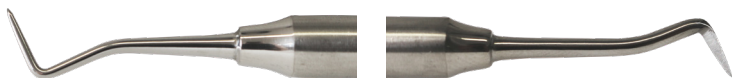

omnis 2

Instrument z ostrzem do podważania

Nr artykułu: OM2 | Cena: 145 PLN

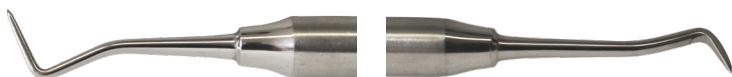

CERAMOMETALIVORE

... by łatwo przeciąć i oszlifować!

Wiertła CMV (ceramometalivore) równocześnie tną i metal i ceramikę. Te niezwykłe instrumenty tnące nie narażają ceramiki i zapobiegają w większości przypadków jej odłamaniu.

Wysoce odporne, sterylizowalne

Wiertła CMV wykonane są z materiału w jednym kawałku. Tną skutecznie i bezpiecznie. Za pomocą jednego instrumentu można przeciąć kilka uzupełnień.


Do sterylizacji 135°C.

Oszczędzają końcówki stomatologiczne.

Dzięki temu, że część robocza płynnie przechodzi w trzonek, frez jest ustawiony zupełnie osiowo. Pracuje praktycznie bez wibracji i dlatego może ciąć bardzo dokładnie. Nadaje się do zastosowania w turbinach i końcówkach przyspieszających.



CERAMOMETALIVORE

	Wersja	Nr art.	Długość części roboczej	Zastosowanie / Zawartość	Cena / opak.
	Ultra	FR-CMVU5	8 mm / 22 mm	Do dłuższych i głębszych wierceń, szlifowania pod korony. / 5 szt.	247 PLN

ZAMÓWIENIA

Tel.: 608 550 333 • E-Mail: mrusek@loser.de

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
WKP	WAMkey Intro Kit , Zawartość: Zestaw 3 dźwigni (WK1-3)	1.628 PLN	<input type="text"/>
WK1	Dźwignia WAMkey nr. 1	610 PLN	<input type="text"/>
WK2	Dźwignia WAMkey nr. 2	610 PLN	<input type="text"/>
WK3	Dźwignia WAMkey nr. 3	610 PLN	<input type="text"/>

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
FCP	MD Guide Intro Kit , Zawartość: 5 tulei pilotujących (z wiertłami) MD Guide (różnej średnicy) 5 tulei stabilizujących MD Guide (różnej średnicy), 1 box do przechowywania i sterylizacji	3.302 PLN	<input type="text"/>

Tuleje pilotujące MD Guide (z wiertłem)

FC-GF__	ø 6,0	ø 7,5	ø 9,0	ø 10,5	ø 12,5	
Ilość:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	472 PLN

Tuleje stabilizujące MD Guide

FC-GNF__	ø 6,0	ø 7,5	ø 9,0	ø 10,5	ø 12,5	
Ilość:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	182 PLN

BTCHIR608060	Box do przechowywania i sterylizacji	398 PLN	<input type="text"/>
--------------	--------------------------------------	---------	----------------------

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
WXP	WAM'X Intro Kit , Zawartość: 1 dźwignia WAM'X, 3 rozmiary ramion i podkładek silikonowych	3.584 PLN	<input type="text"/>
WXE1	Ramiona dźwigni WAM'X małe	125 PLN	<input type="text"/>
WXE2	Ramiona dźwigni WAM'X średnie	125 PLN	<input type="text"/>
WXE3	Ramiona dźwigni WAM'X duże	125 PLN	<input type="text"/>
WXR6	Podkładki silikonowe do WAM'X asortyment	114 PLN	<input type="text"/>

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
CT	Classic Tweezers [®] , pęseta uniwersalna	121 PLN	<input type="text"/>
ET	Endo Tweezers [®] , pęseta endodontyczna	138 PLN	<input type="text"/>

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
GEKT1	GEKO Intro Kit , Zawartość: Pęseta, 20 silikonowych nakładek, pasta GEKO	948 PLN	<input type="text"/>
GEKEM20	GEKO-nakładki silikonowe (20 szt.)	167 PLN	<input type="text"/>
GEKP5	GEKO pasta, strzykawka (5 ml)	167 PLN	<input type="text"/>

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
OM1	Omnis N°1 , nadmiary, modelowanie, przycinanie	145 PLN	<input type="text"/>
OM2	Omnis N°2 , nadmiary, modelowanie, podważanie	145 PLN	<input type="text"/>

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
FR-CMVU5	Wiertła do porcelany i metalu , wersja ultra (8 mm), 5 szt.	247 PLN	<input type="text"/>

Pieczątko/dane kontaktowe:

Dystrybucja:

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i obowiązują do 31.12.2023. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian cen i nie odpowiada za pomyłki drukarskie. Przy zakupach obowiązują ogólne warunki handlowe dystrybutora.



Medicom GmbH
info.dental.eu@medicom.com • www.loser.eu

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: +48 (0) 608 / 55 03 33 • e-mail: mrusek@medicom.com

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



Medicom GmbH
info.dental.eu@medicom.com • www.loser.eu

PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: +48 (0) 608 / 55 03 33 • e-mail: mrusek@medicom.com